

## Garantieklausuler

### VECTOR KRAFT

Garantieklausuler.....	2
Underhåll.....	4
Rengöring.....	5

## Garantiklausuler

2 års garanti (se allmänna villkor; punkt 8.1 garanti „ERGOFIT erbjuder 2 års garanti på sina egna produkter. Under det första året täcks resekostnader och arbetstid inom Tyskland betalas utöver reservdelarna. Under det andra året täcks endast reservdelarna..För varor gäller garantivillkoren från respektive tillverkare”)

Säljaren ansvarar, med uteslutande av annat ansvar, för brister i leveransen, för vilken frånvaron av uttryckligen bekräftade egenskaper delvis är som följande:

1. Alla delar som visar sig vara oanvändbara eller begränsade i användning till följd av en omständighet daterad före risköverföringen - framför allt på grund av bristfällig utformning, dåligt material eller felaktig tillverkning - skall repareras eller bytas under en period av 24 månader efter leveransen. Beslutet om felet kan repareras eller bytas ut tas av säljaren. Leverantören är endast ansvarig för brister i ritningar och material som levererats eller valts av säljaren om han kunde ha upptäckt denna brist såvida inte säljaren omedelbart meddelat köparen om det upptäckta felet.
2. Köparens rätt att återropa garantin slutar 24 månader efter produktens leverans.
3. Ingen garanti kan återopas för skador till följd av olämplig eller felaktig användning, felaktig montering eller felaktig uppstart av köparen eller tredje part, naturligt slitage, felaktig eller vårdslös hantering, olämplig utrustning eller utbyte av delar, felaktiga konstruktionsarbeten, kemiska, elektrokemiska eller elektriska interferenser, såvida intet de kan spåras till ett fel orsakat av säljaren. Köparen står för alla risker i samband med leveransen, även vid fri frakt ex works.
4. Inledningsvis, har försäljaren rätt till två reparationer eller utbyten. Om dessa misslyckas har köparen rätt till avdrag eller rätt att häva avtalet inom ramen för gällande lagstiftning. Säljaren skall ha en frist på sex veckor från och med det datum då felet tillkännagavs.
5. Olämpliga ändringar eller reparationer som utförts på uppdrag av köparen eller en tredje part utan förhandstillstånd från säljaren ogiltigförklarar garantin.
6. Om varorna exporteras kommer garantin att begränsas till tillgången på lösa reservdelar ex works inom garantiperioden. Emballagekostnader, fraktkostnader och arbetskraft betalas av köparen. Om köparen begär reparation på plats av en tekniker från fabriken eller en annan servicetekniker kommer köparen att få stå för avgifterna för resekostnader och arbetskraft.
7. Alla varor som inte har producerats av säljaren är föremål för rättsliga bestämmelser.

Slitdelar är uteslutna från garantispecifikationerna, t.ex.:

- ⊗ Rem, stålkabel, dragrep
- ⊗ "Snap-on" vikter
- ⊗ Sprintar
- ⊗ Justeringsspak
- ⊗ Dynor
- ⊗ Kabelvinschens sensor
- ⊗ Sits, matta, handtag

Garantin ogiltigförklaras om underhållsinstruktionerna inte följs!

## Underhåll

Alla maskiner som används kommersiellt skall ha regelbunden service (enligt lagar och bestämmelser, exempelvis DGUV A3, MPBetreibV). ERGOFIT rekommenderar att maskinerna servas årligen.

Regelbunden och noggrann skötsel samt lämpligt underhåll hjälper att bevara träningsmaskinens värde och att förlänga dess materiella livstid. Därför rekommenderar vi ett regelbundet förebyggande underhåll!

Dessa regelbundna inspektioner är ytterst viktiga för att garantin skall gälla. I händelse av en felfunktion, står ERGOFITs tekniker och ingenjörer till ditt förfogande.

### Omedelbart underhåll måste utföras om:

- ⊗ maskinen genomgått en kraftig mekanisk påfrestning
- ⊗ stålkablar, Kevlar-vajer, rullar, handtag, hävstänger eller "snap-on" vikter är skadade

Underhåll av maskinen kan utföras av ERGOFITs kundservice. Ett serviceavtal kan också upprättas.

## Skötsel och underhåll

Under tillverkningen av sina träningsmaskiner strävar ERGOFIT efter att minska det framtida underhållet.

In följande kapitel beskrivs vissa underhålls- och inspektionsarbeten. Du bör utföra dessa uppgifter regelbundet.

### Du bör överväga följande under underhållsarbetet:

- ⊗ Denna maskin kräver mycket litet underhåll.
- ⊗ De rörliga delarna behöver inte smörjas.
- ⊗ Kromstängerna skall rengöras med en torr trasa och sprejas med teflonsprej.
- ⊗ Före varje träningstillfälle skall man kontrollera dynor, ram, kablar (stål och Kevlar) vikter, handtag och spakar för sprickor och brott.
- ⊗ Kontrollera att alla fästredskap är korrekt åtdragna en gång i månaden.
- ⊗ Icke-behandlade linor skall smörjas varje månad eller efter behov. Vi rekommenderar "Spray AT44 Allround Spray med Teflon".

## Rengöring

Svett, dammpartiklar och smuts skadar träningsmaskinen. Detta kan märkas redan efter några veckor. Metall- och aluminiumdelarna på maskinen kan förändra dess ytor i kombination med svett. Därför bör du rengöra maskinen varje dag.

Det utprovade och rekommenderade medlet finns tillgängligt på "[www.ergo-fit.de/shop](http://www.ergo-fit.de/shop)"

**Obs:** Använd inte desinfektionsmedel som innehåller alkohol för att rengöra galvaniserade komponenter. Detta kan orsaka skador på materialet.

### Under rengöringen bör du ta hänsyn till följande aspekter:

Observera att strömsladden skall vara urdragen när man arbetar med displayen.

- ⊗ Rengör endast maskinen med en fuktig trasa, ett mildt rengöringsmedel eller såpbubblor och torka den med en mjuk trasa.

